

# パイプアダプター のご紹介

## Q パイプアダプターってなに？

- パイプアダプターは、人工喉頭でうまく話すことが難しい方のための補助器具です。
- ユアトーンの音をパイプで直接口の中へ響かせるので、すぐに話せるようになります。



うまく響かない



うまく  
声が出た!!

声が明瞭にならない

聞き取りやすい!

ユアトーンを押し当てると喉が痛い

押し付けないので  
喉が痛くない!

### ○ 製品写真



### ○ 使用イメージ




## Q どんな人が使ってるの？

- 手術直後等で喉の痛みがあり、人工喉頭を喉に押し当てられない方
- 治療の影響等で人工喉頭の声が響かない方
- 人工喉頭を使いはじめたばかりで、まだうまく声が出せない方
- 体力低下や麻痺等により人工喉頭を喉に当てるのが困難な方



# Q パイプアダプターで声が出る仕組み

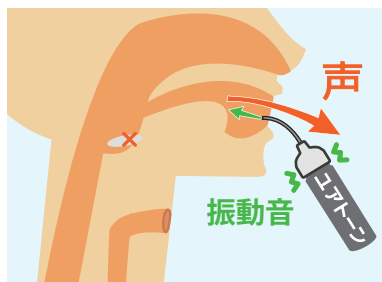

パイプアダプターはパイプを通して、ユアトーンのを直接口の中へ響かせるための補助器具です。ユアトーン先端にパイプアダプターを取り付けてパイプを口に咥え、ユアトーンが発声ボタンを押すと、パイプの中を通過してユアトーンの「ブー」という音が口の中に送り込まれます。口と舌を動かすと、その音が話し声になります。

## ○ セット内容



- ・アダプター本体
- ・交換用パイプ × 5本 他

## ○ 対応機種

- ・ユアトーンⅡ・ゆらぎ
- ・ユアトーンⅡ・UB

## ○ 価格

メーカー希望小売価格

¥2,800 (税抜)

## ○ 主な仕様

- ・製品名称：ユアトーン専用オプション品  
パイプアダプター
- ・型式：DYPAS-01
- ・大きさ：長さ 約 190mm  
(パイプ部を含む)  
本体直径 37mm
- ・材質：- アダプタ部 ABS  
- パイプ部 エラストマー  
※食品衛生法適合

## 別売品のご案内

- ・品名：パイプアダプター専用パイプ  
(5本入)
- ・型式：DYPAP-01
- ・メーカー希望小売価格：

¥1,500 (税抜)

販売

販売に関するお問い合わせ

**ENTFirst**

第一医科株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷2丁目27番16号

<http://first-med.co.jp>

TEL 03-3814-0111

FAX 03-3814-0135

製造

製品に関するお問い合わせ

**DENCOM**  
DENSEI COMMUNICATION Inc.

株式会社 電制  
ブランド事業部

〒067-0051

北海道江別市工栄町8番13号

<http://www.dencom.co.jp>

 0120-422-102

FAX 011-398-6668

E-Mail : [yourtone@dencom.co.jp](mailto:yourtone@dencom.co.jp)