

測定方法について

測定前に被検者が立位で測定者向きに前屈姿勢になっていることを確認してください。誤った姿勢で測定を行うと、正しい測定結果が得られません。

また、被験者が薄い着衣の状態での測定を行ってください。

<測定の手順>（詳しくは取扱説明書をご確認ください）

- ① 腰部にローラー部をのせた状態で[測定ボタン]を押し、そのまま2秒より長く、腰→背中→肩にかけてまっすぐ、ローラー部を被検者へ軽く押し当てながら手前に引きます。

【注意：「測定ボタン」は必ず腰部にのせた状態で押すこと】

- ② ローラー部が肩のあたりまできたら[測定ボタン]を離し、「ピピッ」と音が鳴ったら、ローラー部を被検者の身体から離します。

【注意：測定時間が2秒以下、または20秒以上の場合、測定エラーとなる】

この測定により、腰背部の左右の最大傾斜角度が得られます。

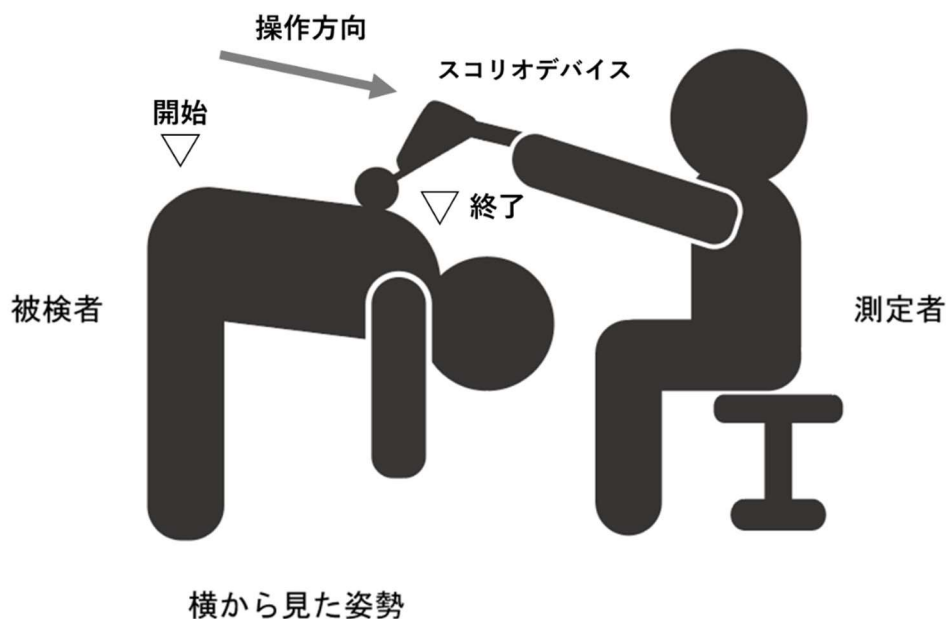


図3：測定のイメージ